


NOTE CONCERNANT LE PRELEVEMENT SANGUIN MATERNEL

IMPORTANT – LIRE ATTENTIVEMENT

Prélever 2 tubes STRECK x 10 ml

1. Remarque importante : les tubes utilisés sont des tubes STRECK à remplissage LENT. Ils doivent être parfaitement remplis pour respecter le ratio sang/conservateur. Il faut bien attendre le remplissage complet avant de retirer le tube.
2. Immédiatement après remplissage, mélanger chaque tube par retournements (10 fois) pour homogénéisation.

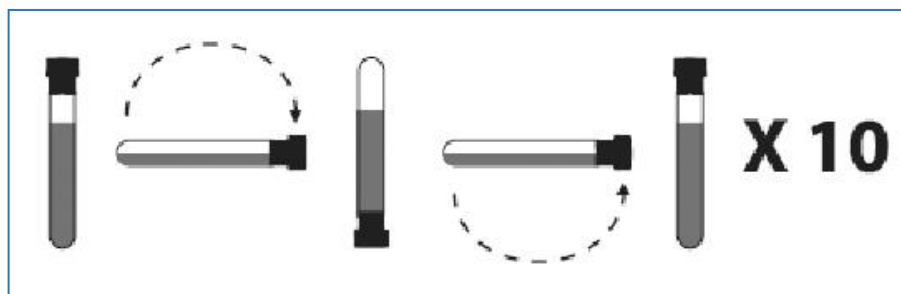

3. Identifier les tubes ; Noter la date et l'heure de prélèvement
4. **NE JAMAIS CONGELER.** Laisser à température ambiante ou à + 4°C jusqu'à envoi.
5. Nous faire parvenir les tubes sous 5 jours à + 4°C (sachet « réfrigéré »)
6. Insérer les documents suivants dans la pochette externe du sachet :
 - La feuille de demande d'examen
 - Formulaire et attestation d'information de la patiente et recueil du consentement signés par le médecin et la patiente
 - Les résultats de l'échographie du 1^{er} trimestre
 - Les différents documents requis selon l'indication (en particulier les résultats de cytogénétique en cas d'antécédent d'anomalies chromosomiques)
 - Le règlement de l'examen en cas de facturation directe à la patiente